



Lingettes désinfectantes

one system basic

Distributeur à usage unique de lingettes jetables,
à remplir de désinfectant

- Emballage flexible compact avec une stabilité accrue pour une manipulation et un contrôle du remplissage particulièrement aisés
- Rempli avec les lingettes DESOTEX
- Utilisation après 15 minutes - même en zone présentant un risque infectieux particulier - 6 semaines de durée d'utilisation



Description du produit

ONE SYSTEM BASIC est un système à usage unique de distributeur de lingettes en non-tissé pour la désinfection de matériel médical et de tout type de surfaces. ONE SYSTEM BASIC permet une utilisation pratique et rapide. Le distributeur de lingettes en non-tissé particulièrement pratique et compact est simple, sûr et efficace et rapidement prêt à l'emploi étant donné qu'il est déjà prérempli d'un rouleau DESOTEX en non-tissé adapté. L'utilisateur peut faire tremper directement le système avec le désinfectant souhaité et l'utiliser après un délai d'action court de 15 minutes. La construction et la manipulation se basent sur celles des distributeurs de lingettes habituels, leur conception est toutefois plus souple et compacte.

ONE SYSTEM BASIC est exclusivement destiné à un usage unique. Il ne nécessite aucun retraitement à l'issue d'une durée d'utilisation prolongée de 6 semaines. Le système peut être éliminé avec les produits destinés au recyclage lorsqu'il a été utilisé et que les éventuels résidus ont été mis au rebut.

Conseils d'utilisation	Durée d'utilisation 42 jours	Test à 4 zones ¹	Utilisation possible également en zone présentant un risque infectieux particulier ²
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
OPTISAL N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOCEPT AF	✓	✓	✓
DESCOCEPT FORTE	✓	✓	✓

¹ testé avec les germes de test obligatoires de la norme EN 16615 (bactéricide/levuricide)


² conf. au communiqué de la commission sur les désinfectants dans VAH avec le concours du « groupe de travail 4+4 » : Pour l'utilisation des distributeurs de lingettes en zone présentant un risque infectieux particulier, Hyg Med 2014; 39 – 9.



one system basic

Distributeur à usage unique de lingettes jetables, à remplir de désinfectant

Conseils d'utilisation

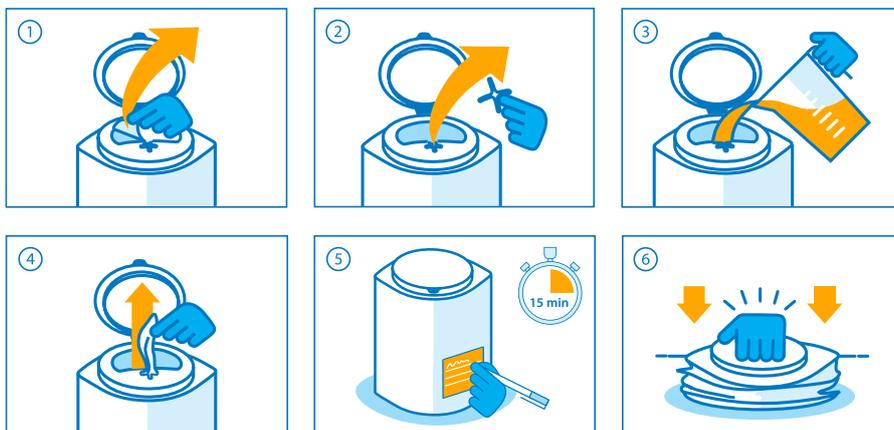

Champs d'application

Système à usage unique de distributeur de non-tissé pour l'imprégnation, la conservation et l'utilisation avec des désinfectants de surface adaptés à la désinfection et au nettoyage de matériel médical, d'instruments médicaux et de surfaces de tous types.

Utilisation

ONE SYSTEM BASIC est livré déjà prérempli avec les lingettes requises et peut être rempli par l'utilisateur avec le désinfectant souhaité. Fabriquer 2,5 litres de solution prête à l'emploi du désinfectant souhaité (consulter les indications du fabricant pour connaître les concentrations et la durée d'action).

Ouvrir le couvercle de protection du distributeur de lingettes. Enlever les deux éléments de la membrane d'étanchéité. Verser 2,5 litres de solution désinfectante. Enfiler la première lingette dans l'encoche en forme d'ancre du dispositif distributeur. Tirer et jeter la première lingette. Fermer le couvercle de protection et fixer la poignée si besoin. Remplir intégralement les champs de suivi sur l'étiquette.

Le système est prêt à l'emploi après 15 minu-

tes de trempage.

Indication :

La durée de conservation élevée de 42 jours s'applique uniquement aux désinfectants de Dr. Schumacher GmbH sélectionnés sur la liste VAH. En cas de doute concernant la durée d'utilisation d'un produit ou pour savoir si un produit est adapté, veuillez nous contacter ou contacter le fabricant du désinfectant concerné.

Attestations

Nos produits sont intégralement contrôlés. Sur demande, nous mettons à votre disposition les rapports des experts.



Produit	Conditionnement	Contenu	Unité de conditionnement	Dimensions	REF
ONE SYSTEM BASIC	Distributeur	120 lingette	4	17,5 x 36 cm	00-915-OSEB120

Dr. Schumacher est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispose d'un système de gestion de l'environnement validé en conformité avec l'EMAS et est membre de l'IHO, VCI, BAH, DGSV et auprès de DGKH. www.schumacher-online.com