



Salviette disinfettanti

one system basic

Sistema da perdere di distribuzione di salviette monouso, da riempire con disinfettante

- Confezione flessibile compatta con stabilità migliorata per semplificarne l'utilizzo e il controllo del riempimento
- Riempita con salviette in TnT DESOTEX
- Impiego dopo 15 minuti - per le aree particolarmente a rischio di infezioni - con periodo di validità di 6 settimane



Descrizione del prodotto

ONE SYSTEM BASIC è un sistema di dispenser di salviette in TnT monouso per la disinfezione di dispositivi e strumenti medici, così come superfici di tutti i tipi. ONE SYSTEM BASIC consente un'applicazione pratica e che fa risparmiare tempo. Il dispenser di salviette in TnT monouso è particolarmente pratico e compatto, semplice, sicuro ed efficiente ed è rapidamente pronto all'uso poiché è preimpiegato con un apposito rotolo di salviette in TnT DESOTEX(R). L'utilizzatore può impregnare direttamente il sistema riempiendolo con il disinfettante desiderato e utilizzare il prodotto dopo un breve periodo di impregnazione di 15 minuti. La costruzione e l'applicazione si basano su un comune dispenser di salviette in TnT, ma con un design flessibile e salvaspazio.

ONE SYSTEM BASIC è esclusivamente monouso. Una volta terminato il lungo periodo di validità di 6 settimane non è necessario alcun trattamento. Una volta esaurito e smaltito l'eventuale residuo, il sistema può essere riciclato.

Disinfettante	Periodo di validità 42 giorni	Test a 4 campi ^{1,2}	Impiego anche in zone a particolare rischio di infezione ²
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
OPTISAL N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOCEPT AF	✓	✓	✓
DESCOCEPT FORTE	✓	✓	✓

¹ testato con tutti i germi obbligatori in base alla norma EN 16615 (battericida/levurocida) testato con tutti i germi obbligatori in base alla norma EN 16615 (battericida/levurocida)

² in base alla comunicazione della commissione sugli agenti disinfettanti nella norma VAH con il contributo del „Gruppo di lavoro 4+4“:
Per l'impiego di dispenser di panni in aree particolarmente a rischio di infezioni, Hyg Med 2014; 39 – 9.

IT 09/2018



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444


info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com



one system basic

Sistema da perdere di distribuzione di salviette monouso, da riempire con disinfettante

Avvertenze per l'uso

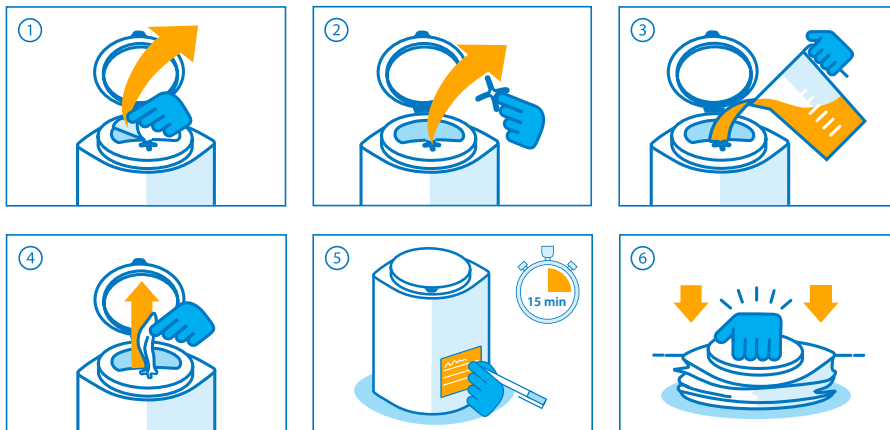

Campi di applicazione

Sistema di dispenser di salviette in TnT monouso per l'impregnazione, la conservazione e l'applicazione igienica di disinfettanti per superfici adatti per la disinfezione e la pulizia di dispositivi e strumenti medici o superfici di tutti i tipi.

Uso

ONE SYSTEM BASIC viene fornito già pre-riempito con le idonee salviette in tnt e può essere riempito dall'utilizzatore con il disinfettante desiderato: preparare 2,5 litri di soluzione di impiego pronta all'uso del disinfettante desiderato (desumere le concentrazioni di impiego e il tempo di azione dalle indicazioni del produttore).

Aprire il coperchio protettivo del dispenser di salviette in tnt. Rimuovere entrambe le parti della membrana sigillante.

Versare 2,5 litri di soluzione disinfettante. Far passare la prima salvietta nell'apertura a forma di ancora del dispenser. Estrarre ed eliminare la prima salvietta. Chiudere il coperchio protettivo e, se si desidera, fissare il manico. Per la documentazione, compilare i campi appositi riportati sull'etichetta.

Il sistema è pronto all'uso dopo un tempo d'immersione di 15 minuti.

Avvertenza:

il periodo di validità prolungato di 42 giorni è valido solo per determinati disinfettanti per superfici dell'elenco VAH di Dr. Schumacher GmbH. In caso di domande sul periodo di validità ammesso e l'idoneità di un prodotto si prega di contattare noi o il rispettivo produttore del disinfettante.

Perizie

Disponiamo di una gamma completa di perizie per i nostri prodotti. Su richiesta, saremo lieti di metterle a vostra disposizione.



Prodotto	Contenitori	Contenuto	Unità di confezionamento	Dimensioni	REF
ONE SYSTEM BASIC	Dispenser	120 salvietta	4	17,5 x 36 cm	00-915-OSEB120

L'azienda Dr. Schumacher è certificata secondo DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011, dispone di un sistema di gestione ambientale convalidato secondo EMAS ed è membro di IHO, VCI, BAH, DGSV e DGKH. www.schumacher-online.com

